

サイトスピン4

エラーの対処方法

サイトスピン4が安全かつ効率的に作動できない状況を検知した場合、警告音が鳴り、エラーコードが表示されます。


SPEEDウィンドウにはErr、TIMEウィンドウにはエラーコードが表示されます。

エラー音解除するには、【STOP】ボタンを押してアラームを消音にしてください。

シールドヘッド(ローター)が回転しない場合は、【STOP】ボタンをもう1度押しエラーをクリアにしてください。エラーがクリアされたら、外フタを一旦開けてから閉めてください。

エラーが消えない場合は、一度主電源をOFFにしてから再度ONにしてください。

エラーが解除できない場合は、弊社サービス部門に連絡してください。

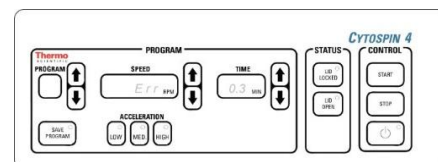

エラーコード表

エラーコード	エラー内容	対処方法
Err01	フタエラー フタのスイッチが正常に作動していない。	【STOP】を押し、フタを開けてから閉める。
Err02	速度エラー 許容範囲内である±20rpm を維持できないか、1分以内に設定した速度に到達できない	【STOP】を押し、フタを開けてから閉める。 シールドヘッドが正しく装着されているか、支障なく回転するかをチェック。 軸がずれている場合、外フタのヒンジが折れている場合など問題が解決しない場合は、サービス部門へ連絡
Err03	バランス崩れエラー バランス崩れのエラーを検知。	主電源をOFFにしてから、再びONにする。 フタを開いてから、再度閉める。 試料が対角線上に装填されているか確認。 シールドヘッドが損傷していないことを確認。 シールドヘッドが自由に回転するか確認。 問題が解決しない場合は、サービス部門へ連絡
Err04	バッテリーが充電されていない。 システムメモリが破損したためリセットされた。	【STOP】を押し、フタを開けてから閉める。 主電源をONにし24時間ONの状態を維持する。 問題が解決しない場合は、サービス部門へ連絡
Err05	運転中にフタロックが手動で解除された。 フタのソレノイドが正常に作動していない。	【STOP】を押し、フタを開けてから閉める。 問題が解決しない場合は、サービス部門へ連絡
Err06	電源をONにしたとき、またはエラー後にフタの開け閉めをしていない	【STOP】を押し、フタを開けてから閉める。

202604